

## **Nettoyage Vaste du Vet abc**

- 1 Choisissez # 4 – Service - au menu principal - appuyez sur RETOUR
- 2 Choisissez # 2 – Vidange bacs - appuyez sur RETOUR.
- 3 Ouvrir la porte
- 4 Seringuez 5 ml de javel dans le bac mélange
- 5 Choisissez # 5 (au menu service) - Transfert
- 6 Seringuez 5 ml de javel dans le bac GR
- 7 Choisissez # 1 - Débouchage -(au menu service) appuyez sur RETOUR
- 8 Répétez # 7 dix fois
- 9 Laissez reposer le Vet abc pour 3 ou 4 heures, ou pour la nuit
- 10 Exécutez 10 débouchages (# 4 Service - # 1)
- 11 Effectuez un nettoyage concentré
- 12 Exécutez un cycle d'amorçage (# 4 Service - # 3 Bloc de réactif – choisissez amorçage)
- 13 Effectuez une mise en marche
- 14 Si la mise en marche fonctionne alors tout est normal
- 15 Si la mise en marche échoue, contactez Vet Novations

**Sans frais: 1-866-382-6937**