

Nettoyage Vaste du Vet abc

1. Choisissez # 4 – Service - au menu principal - appuyez sur RETOUR
2. Choisissez # 2 – Vidange bacs - appuyez sur RETOUR.
3. Ouvrir la porte
4. Seringuez 5 ml de javel dans le bac mélange
5. Choisissez # 5 (au menu service) - Transfert
6. Seringuez 5 ml de javel dans le bac GR
7. Choisissez # 1 - Débouchage -(au menu service) appuyez sur RETOUR
8. Répétez # 7 dix fois
9. Laissez reposer le Vet abc pour 3 ou 4 heures, ou pour la nuit
10. Exécutez 10 débouchages (# 4 Service - # 1)
11. Effectuez un nettoyage concentré
12. Exécutez un cycle d'amorçage (# 4 Service - # 3 Bloc de réactif –choisissez amorçage)
13. Effectuez une mise en marche
14. Si la mise en marche fonctionne alors tout est normal
15. Si la mise en marche échoue, contactez Vet Novations

Sans frais: 1-866-382-6937